

# iSED® PRO-Testkarte

Ausschließlich für das iSED Pro-BSG-Analysegerät



**REF** 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000



## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die iSED PRO-Testkarten entsprechen den ISO 7816-Normen und sind ausschließlich für die Verwendung mit dem automatischen BSG-Analysegerät iSED PRO vorgesehen. Die Testkarten enthalten Testguthaben, die für die Bearbeitung von Proben im iSED PRO-Analysegerät erforderlich sind.

## MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC)

## LAGERUNG UND STABILITÄT

Lagertemperatur bei Nichtgebrauch -35 °C bis +80 °C

Betriebstemperatur +10 °C bis 30 °C

## VERFAHREN

Für ein ausführlich beschriebenes Verfahren wird auf das iSED PRO-Betriebshandbuch (120-09-007) verwiesen.

**Um Testguthaben von der Testkarte herunterzuladen, sind folgende Schritte zu befolgen:**

1. Die Testkarte senkrecht, mit der bedruckten Seite nach links, in den Chipkartenleser einführen.
2. Sobald die Karte eingeführt ist, wird das Guthaben automatisch auf das Gerät geladen, und das Analysegerät zeigt über eine Meldung auf dem Bildschirm an, dass der Download abgeschlossen ist.
3. Das insgesamt verfügbare Guthaben schließt das neu heruntergeladene Guthaben und etwaiges Restguthaben, das bereits vor dem Download vorhanden war, mit ein.
4. Sobald das gesamte Guthaben auf das Gerät heruntergeladen worden ist, kann die Testkarte entfernt und entsorgt werden.

**Hinweis:** Wenn das Gerät negatives Testguthaben aufweist und zusätzliches Testguthaben von der Testkarte heruntergeladen wurde, wird der Gesamtwert des verfügbaren Testguthabens um das gesamte negative Guthaben reduziert.

**Warnung:** Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaats oder der Zulassungsbehörde, in der der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



ALCOR Scientific LLC  
20 Thurber Boulevard  
Smithfield, Rhode Island 02917, USA  
(Telefon) + 01 800 4955270 □ 401 7373774  
[WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM](http://WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM)



Nach weiteren Sprachen suchen



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland