

Karta testowa iSED® PRO

Wyłącznie do użytku z analizatorem iSED Pro do pomiaru szybkości opadu erytrocytów



REF 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000

CE

IVD

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Karty testowe iSED PRO są zgodne z normą ISO 7816 i są przeznaczone do użytku wyłącznie z automatycznym analizatorem iSED PRO do pomiaru szybkości opadu erytrocytów (OB). Karty testowe zawierają kredyty dla badań, wymagane do przetwarzania próbek przez analizator iSED PRO.

MATERIAŁ

Polichlorek winylu (PVC)

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Temperatura przechowywania produktu w stanie nieużytkowania: -35°C do +80°C

Temperatura użytkowania: +10°C do 30°C

PROCEDURA

Szczegółowy opis procedury zawiera Instrukcja obsługi analizatora iSED PRO (120-09-007).

Aby pobrać kredyty dla badań z karty testowej:

1. Włóż kartę testową do czytnika kart pionowo, stroną zadrukowaną skierowaną w lewo.
2. Po włożeniu karty kredyty zostaną automatycznie pobrane do urządzenia, a analizator poinformuje o zakończeniu pobierania odnośnym komunikatem na ekranie.
3. Łączna liczba kredytów obejmie nowo pobrane kredyty oraz wszelkie kredyty pozostałe w urządzeniu przed operacją pobrania.
4. Po pobraniu wszystkich kredytów do urządzenia można wyjąć kartę testową z czytnika i wyrzucić ją.

Uwaga: Jeśli urządzenie posiada ujemną liczbę kredytów i z karty testowej zostaną pobrane dodatkowe kredyty, łączna liczba dostępnych kredytów zostanie pomniejszona o wartość kredytów ujemnych.

Ostrzeżenie: Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE lub organowi regulacyjnemu, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA
(Telefon) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Zeskanuj, by wyświetlić wersję językową



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland