

Instrucciones de uso

Solución de limpieza para uso exclusivo con el analizador VES iSED® PRO

REF 112-12-022

deepCLEAN® PRO 3 x 3,0 ml

CE

IVD

USO PREVISTO

deepCLEAN PRO es una solución alcalina de limpieza para usar con el analizador automático de velocidad de eritrosedimentación (VES) iSED PRO que sirve para eliminar los residuos y proteínas que se acumulan en el analizador durante la realización de pruebas rutinarias.

RESUMEN Y PROCEDIMIENTO

El uso de deepCLEAN PRO está indicado únicamente para el analizador automático VES iSED PRO. La solución de limpieza deepCLEAN PRO es una solución de hipoclorito sódico que sirve para eliminar los residuos y las proteínas sanguíneas del analizador iSED PRO después de intervalos de uso rutinarios o durante otros procedimientos de mantenimiento o resolución de problemas. El uso de deepCLEAN PRO elimina los residuos sanguíneos acumulados de las vías fluidicas y es esencial para el correcto funcionamiento del analizador iSED PRO. El proceso de limpieza profunda del iSED PRO requiere el uso de 500 µl de la solución deepCLEAN PRO y dura unos tres (3) minutos. Los tubos deepCLEAN PRO pueden usarse hasta cuatro (4) veces y se han diseñado para almacenarse en el iSED PRO cuando estén en uso. El analizador realiza un procedimiento de limpieza profunda de forma automática con deepCLEAN PRO cada 7 días o cada 1000 muestras (lo que suceda primero). Después de completar la limpieza con deepCLEAN PRO, los análisis pueden reanudarse de manera normal. Los tubos de deepCLEAN PRO se han diseñado para usarse con los tapones puestos y estos no deberían retirarse en ningún momento.

MATERIAL

Contenido: solución de hipoclorito sódico

Tubo: polietileno de alta densidad (PEAD)

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Este producto es estable hasta su fecha de caducidad. Los tubos de deepCLEAN PRO **deberán mantenerse siempre con el tapón puesto y en posición vertical** para que la integridad del producto no se vea afectada y para reducir el riesgo de exposición al hipoclorito sódico. El producto deberá almacenarse alejado de la luz hasta cargarlo en el analizador iSED PRO. Una vez en el analizador, el tubo deepCLEAN PRO puede usarse hasta cuatro (4) veces.

La temperatura de almacenamiento es de 4° a 22 °C. Es importante respetar las condiciones de almacenamiento, ya que las temperaturas superiores afectan negativamente a la eficacia de las soluciones de hipoclorito sódico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Esta solución contiene hipoclorito sódico. Los tubos deben mantenerse siempre con el tapón puesto y en posición vertical para reducir el riesgo de exposición al hipoclorito sódico. Use un equipo de protección individual (EPI) adecuado al usar este producto.

Evite el contacto con los ojos y la piel. Si la solución entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua inmediatamente y solicite asistencia médica urgente. Si la solución entra en contacto con la piel, enjuague o lave la zona inmediatamente.

Este producto contiene sustancias clasificadas como muy tóxicas para los organismos acuáticos. La liberación accidental en el medio ambiente puede provocar daños ecológicos significativos. Tome las precauciones adecuadas para evitar la exposición ambiental. La eliminación debe cumplir con las regulaciones aplicables de desechos peligrosos.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (continuación)

| | |
|--------------------|--|
| H314 | Provoca quemaduras y daños oculares graves. |
| H400 | Muy tóxico para la vida acuática |
| P264 | Lávese bien la piel después de la manipulación. |
| P280 | Póngase guantes/ropa/gafas/máscara de protección |
| P303 + P361 + P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO): quítese inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuague la piel o lávese con agua. |
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar concienzudamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto si las lleva puestas y le resulta sencillo hacerlo. Siga enjuagándose. |
| P310 | Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P501 | Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales y nacionales. |
| EUH031 | El contacto con ácidos produce gases tóxicos. |

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe ser informado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o a la Autoridad Reguladora en la que esté establecido el usuario y/o paciente.

PROCEDIMIENTO

Para consultar el procedimiento detallado de limpieza con deepCLEAN PRO, consulte las instrucciones de uso de iSED PRO (120-09-007). Este producto solo puede utilizarse con el analizador iSED PRO.

Para obtener información adicional o hacernos preguntas sobre la información anterior, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de ALCOR® Scientific enviando un correo electrónico a techservice@alcorscientific.com o llamando por teléfono al 1.800.495.5270 (solo en los EE. UU.) / + 1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA
(Teléfono) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Escanear para ver otros idiomas



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland