

iWASTE®, iWASTE PRO ve miniiWASTE® Atık Konteyneri Kullanım Talimatları

iSED® ESR Analiz Cihazları Ailesine Özel Atık Konteynerleri

REF	Model	Özellikler
112-12-005	iWASTE Atık Konteyneri	4 x 500 mL
112-12-002	iWASTE Atık Konteyneri	24 x 500 mL
112-12-009	iWASTE PRO Atık Konteyneri	1 x 1,8 L
112-12-004	miniiWASTE Atık Konteyneri	4 x 300 mL

KULLANIM AMACI

iWASTE, iWASTE PRO ve miniiWASTE Atık Konteynerleri; atık toplama amacıyla sırasıyla iSED/iSED ELITE, iSED PRO ve miniiSED Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) Analiz Cihazlarıyla kullanılması amaçlanan atık toplama kaplarıdır.

MALZEME

iWASTE Atık Konteyneri: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
iWASTE PRO Atık Konteyneri: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
miniiWASTE Atık Konteyneri: Polietilen Tereftalat (PET)

SAKLAMA VE STABİLİTE

iWASTE saklama sıcaklığı: -35 °C ile +80 °C arası
iWASTE PRO saklama sıcaklığı: -35 °C ile +80 °C arası
miniiWASTE saklama sıcaklığı: -30 °C ile +60 °C arası
Tüm Atık Konteynerleri için çalışma sıcaklığı +10 °C ile +30 °C arasındır

ATIK KONTAYNERİNİ DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ

Detaylı prosedür için kullanılan analiz cihazının Operatör Kılavuzuna bakınız: iSED Operatör Kılavuzu (112-09-043), iSED/iSED ELITE Operatör Kılavuzu (222-09-007), iSED PRO Operatör Kılavuzu (120-09-007) veya miniiSED Operatör Kılavuzu (1017-09-001).

1. LUER konnektörünü iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE tüp bağlantı kapağından ayırın.
2. iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE şişesini analiz cihazından çıkarıp tüp bağlantı kapağını şişeden çıkarın ve şişeyi laboratuvarınızın biyolojik atık protokolüne uygun olarak bertaraf edin. **TÜP BAĞLANTI KAPAĞINI BERTARAF ETMEYİN.**
3. Sızdırmaz kapağı sökün ve yeni bir iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE şişesiyle tüp bağlantı kapağını yerleştirin.
4. Yeni şişeyi analiz cihazına yerleştirin. LUER konnektörünü tüp bağlantı kapağına **sıkıca** yeniden takın. iSED ve iSED ELITE analiz cihazlarında, sızıntıyı önlemesi için havalandırma deliği üste yerleştirilmelidir. iSED PRO ve miniiSED analiz cihazlarında, havalandırma deliği dik şekilde yerleştirilmelidir.

NOT: Boş olan iWASH® PRO Yıkama Sıvısı şişeleri Atık Konteyneri olarak kullanılabilir. Aynı prosedür izlenmelidir. Atık konteyneri olarak yeniden kullanımı amaçlanıyorsa boş olan iWASH PRO şişesinin doğru şekilde etiketlendiğinden emin olun.



UYARI

iSED, iSED ELITE, iSED PRO ve miniiSED ile normal kullanımı sırasında bu ürünler biyolojik kaynak materyali toplayacaktır. Potansiyel olarak bulaşıcı kabul edin.

Uyarı: Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve AB Üye Devletinin yetkili makamına veya kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu Düzenleyici Makama bildirilmelidir.

Yukarıdaki bilgilerle ilgili ek bilgi veya sorular için lütfen techsupport@alcorscientific.com adresinden veya 1.800.495.5270 (sadece ABD) / + 1.401.737.3774 no'lu numaralardan ALCOR® Scientific Teknik Destek birimiyle iletişime geçin.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 ABD
(Telefon) 800.495.5270 ☎ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Ek diller için tarayın



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland