

Cartão de Teste iSED®

Exclusivamente para a Família de Analisadores de Velocidade de Hemossedimentação iSED



REF 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

USO PRETENDIDO

Os Cartões de Teste iSED seguem os padrões ISO 7816 e foram criados para uso exclusivo com a Família de Analisadores iSED. Os Cartões de Teste contêm créditos de teste que são necessários para processar amostras nesses analisadores: iSED, miniiSED®, iSED ELITE e MIZAR®.

MATERIAL

Policloreto de vinila (PVC)

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Temperatura de armazenamento quando o dispositivo não está em uso -35 °C a +80 °C

Temperatura de operação +10 °C a 30 °C

PROCEDIMENTO

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador iSED (112-09-043), Manual do Operador iSED/iSED ELITE (222-09-007), Manual do Operador miniiSED (1017-09-001) ou Manual do Operador MIZAR (115-09-011).

Para fazer download de créditos de teste do Cartão de Teste:

1. Insira o Cartão de Teste no leitor de cartão inteligente com a seta voltada para cima e para frente.
2. Após a inserção, os créditos serão transferidos por download automaticamente para o instrumento e o analisador indicará a conclusão do download por meio de uma mensagem na tela.
3. O total de créditos disponíveis incluirá os créditos que acabaram de ser transferidos por download e os créditos existentes antes do download.
4. Depois que todos os créditos forem transferidos para o instrumento, o Cartão de Teste poderá ser removido e descartado.

Nota: Se o instrumento tiver créditos de teste negativos antes da inserção do cartão, e créditos de teste adicionais foram transferidos por download do Cartão de Teste, o novo total de créditos de teste disponíveis será a quantidade do cartão menos o total negativo anterior.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 - EUA
(Telefones) +1 (800) 495-5270 □ +1 (401) 737-3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Acesse aqui para idiomas adicionais



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland