

# iSED® Cartão de Teste

Para utilização exclusiva com a Família de Analisadores de Taxa de Sedimentação de Eritrócitos iSED



**REF** 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000  
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

## UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os Cartões de Teste iSED estão em conformidade com a norma ISO 7816 e destinam-se a ser utilizados exclusivamente com a Família de Analisadores iSED. Os Cartões de Teste contêm créditos de teste que são necessários para o processamento de amostras nos seguintes analisadores: iSED, miniiSED®, iSED ELITE, e MIZAR®.

## MATERIAL

Policloreto de vinilo (PVC)

## ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Temperatura de armazenamento quando o dispositivo não está em utilização -35 °C a +80 °C

Temperatura de funcionamento +10 °C a 30 °C

## PROCEDIMENTO

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador iSED (112-09-043), Manual do Operador iSED/iSED ELITE (222-09-007), Manual do Operador miniiSED (1017-09-001) ou Manual do Operador MIZAR (115-09-011).

### Para transferir os créditos de teste do Cartão de Teste:

1. Insira o Cartão de Teste, com a seta virada para cima e para a frente, no leitor de cartão inteligente.
2. Uma vez inserido, os créditos serão automaticamente transferidos para o instrumento e o analisador indicará que a transferência foi concluída através de uma mensagem no ecrã.
3. Os créditos totais disponíveis irão incluir os créditos recém-transferidos e quaisquer créditos residuais anteriores à transferência.
4. Uma vez transferidos todos os créditos para o instrumento, o Cartão de Teste pode ser removido e eliminado.

**Nota:** se o instrumento tiver créditos de teste negativos e tiverem sido transferidos créditos de teste adicionais a partir do Cartão de Teste, o número total de créditos de teste disponíveis será deduzido do valor do número total de créditos negativos.



ALCOR Scientific LLC  
20 Thurber Boulevard  
Smithfield, Rhode Island 02917, EUA  
(Telefone) 800.495.5270 □ 401.737.377  
[WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM](http://WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM)



Leia para outros idiomas



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland