

iSED® Test Kartı

iSED Eritrosit Sedimentasyon Hızı Analiz Cihazları Ailesine Özel



REF 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

KULLANIM AMACI

iSED Test Kartları, ISO 7816 standartlarına uygun olup, yalnızca iSED Analiz Cihazları Ailesiyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Test Kartları; iSED, miniiSED®, iSED ELITE ve MIZAR® analiz cihazlarında örneklerin işlenmesi için gerekli olan test kredilerini içerir.

MALZEME

Polivinil Klörür (PVC)

SAKLAMA VE STABİLİTE

Cihaz kullanımda değilken saklama sıcaklığı -35 °C ila +80 °C'dir
Çalışma sıcaklığı +10 °C ila 30 °C

PROSEDÜR

Detaylı prosedür için iSED Operatör Kılavuzu (112-09-043), iSED/iSED ELITE Operatör Kılavuzu (222-09-007), miniiSED Operatör Kılavuzu (1017-09-001) veya MIZAR Operatör Kılavuzu'na (115-09-011) bakın.

Test Kartından test kredileri indirmek için:

1. Test Kartını, ok yukarıya ve ileriye bakacak şekilde akıllı kart okuyucusuna yerleştirin.
2. Yerleştirildikten sonra, krediler otomatik olarak cihaza indirilecek ve analiz cihazı indiriminin tamamlandığını ekranda görüntülenecek bir mesajla gösterecektir.
3. Toplam kullanılabilir kredi, yeni indirilen kredileri ve indirme öncesi kalan kredileri içerecektir.
4. Tüm krediler cihaza indirildikten sonra Test Kartı çıkarılıp atılabilir.

Not: Eğer cihazda negatif test kredileri varsa ve Test Kartından ek test kredileri indirilmişse toplam kullanılabilir test kredisi sayısı, toplam negatif krediler kadar azaltılacaktır.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, ABD
(Telefon) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Diller için tarayın



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland