

## iWASTE®, iWASTE PRO ve miniiWASTE® Atık Konteyneri Kullanım Talimatları

iSED® ESR Analiz Cihazları Ailesine Özel Atık Konteynerleri

REF	112-12-005	iWASTE Atık Konteyneri, 4 x 500 mL
	112-12-002	iWASTE Atık Konteyneri, 24 x 500 mL
	112-12-009	iWASTE PRO Atık Konteyneri, 1 x 1,8 L
	112-12-004	miniiWASTE Atık Konteyneri, 4 x 300 mL

### KULLANIM AMACI

iWASTE, iWASTE PRO ve miniiWASTE Atık Konteynerleri; atık toplama amacıyla sırasıyla iSED/iSED ELITE, iSED PRO ve miniiSED Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) Analiz Cihazlarıyla kullanılması amaçlanan atık toplama kaplarıdır.

### MALZEME

iWASTE Atık Konteyneri: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)

iWASTE PRO Atık Konteyneri: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)

miniiWASTE Atık Konteyneri: Polietilen Tereftalat (PET)

### SAKLAMA VE STABİLİTE

iWASTE saklama sıcaklığı: -35 °C ile +80 °C arası

iWASTE PRO saklama sıcaklığı: -35 °C ile +80 °C arası

miniiWASTE saklama sıcaklığı: -30 °C ile +60 °C arası

Tüm Atık Konteynerleri için çalışma sıcaklığı +10 °C ile +30 °C arasındadır

### ATIK KONTEYNERİNİ DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ

Detaylı prosedür için kullanılan analiz cihazının Operatör Kılavuzuna bakınız: iSED Operatör Kılavuzu (112-09-043), iSED/iSED ELITE Operatör Kılavuzu (222-09-007), iSED PRO Operatör Kılavuzu (120-09-007) veya miniiSED Operatör Kılavuzu (1017-09-001).

1. LUER konnektörünü iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE tüp bağlantı kapağından ayırın.
2. iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE şişesini analiz cihazından çıkarıp tüp bağlantı kapağını şişeden çıkarın ve şişeyi laboratuvarınızın biyolojik atık protokolüne uygun olarak bertaraf edin. **TÜP BAĞLANTI KAPAĞINI BERTARAF ETMEYİN.**
3. Sızdırmaz kapağı sökün ve yeni bir iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE şişesiyle tüp bağlantı kapağını yerleştirin.
4. Yeni şişeyi analiz cihazına yerleştirin. LUER konnektörünü tüp bağlantı kapağına **sıkıca** yeniden takın. iSED ve iSED ELITE analiz cihazlarında, sızıntıyı önlemesi için havalandırma deliği üste yerleştirilmelidir. iSED PRO ve miniiSED analiz cihazlarında, havalandırma deliği dik şekilde yerleştirilmelidir.

**NOT:** Boş olan iWASH® PRO Yıkama Sıvısı şişeleri Atık Konteyneri olarak kullanılabilir. Aynı prosedür izlenmelidir. Atık konteyneri olarak yeniden kullanımı amaçlanıyorsa boş olan iWASH PRO şişesinin doğru şekilde etiketlendiğinden emin olun.



### UYARI

iSED, iSED ELITE, iSED PRO ve miniiSED ile normal kullanımı sırasında bu ürünler biyolojik kaynak materyali toplayacaktır. Potansiyel olarak bulaşıcı kabul edin.

Yukarıdaki bilgilerle ilgili ek bilgi veya sorular için lütfen techsupport@alcorscientific.com adresinden veya 1.800.495.5270 (sadece ABD) / + 1.401.737.3774 no'lu numaralardan ALCOR® Scientific Teknik Destek birimiyle iletişime geçin.



ALCOR Scientific LLC  
20 Thurber Boulevard  
Smithfield, Rhode Island 02917 ABD  
(Telefon) 800.495.5270 ☎ 401.737.3774  
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland